

# Viser ditt HemoCue Hb/Glucose 201+/RT feilkoden E02?


Da trenger optikkenheten rengjøring!! Se prosedyren på baksiden.



HemoCue Cleaner

For å unngå feilkoden E02 anbefaler vi rutinemessig rengjøring med HemoCue Cleaner 1 gang i måneden.

- Obs! Instrumentet skal være avslått før rengjøring!

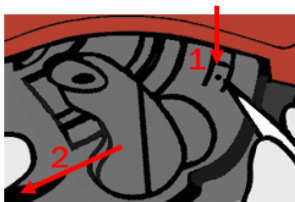

Løsne opp kvetteholderen




Fjern kvetteholderen



Rengjør kvetteholderen



La Cleaner'en ligge i 10 minutter før rengjøring

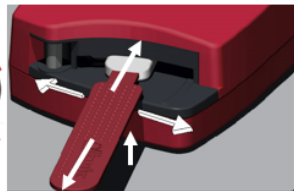

Rengjør optikkenheten inn/ut og venstre/høyre  
**X 2 Cleanere**



Vent 15 minutter før kvetteholderen settes på plass og instrumentet slås på.