

Viser ditt HemoCue Hb/Glucose 201+/RT feilkoden E02?

Da trenger optikkenheten rengjøring!! Se prosedyren på baksiden.



+



For å unngå feilkoden E02 anbefaler vi rutinemessig rengjøring med HemoCue Cleaner 1 gang i måneden.

- Obs! Instrumentet skal være avslått før rengjøring!



Løsne opp kyvetteholderen




Fjern kyvetteholderen



Rengjør kyvetteholderen



La Cleaner'en ligge i 10 minutter før rengjøring

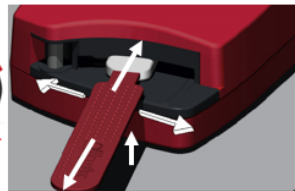

Rengjør optikkenheten inn/ut og venstre/høyre
X 2 Cleanere



Vent 15 minutter før kyvetteholderen settes på plass og instrumentet slås på.